

## ALCO CID WIPES



### Opis produktu

Chusteczki do dezynfekcji zawierające etanol

Opis produktu

Alco Cid Wipes to gotowe do użycia chusteczki o działaniu bakterio-, grzybo-, drożdżako- i wirusobójczym przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia, mebli, klamek itp. w miejscach publicznych i w przemyśle, a także wszelkich powierzchni kontaktujących się żywnością w przemyśle spożywczym, miejscach przechowywania żywności, handlu i gastronomii; mogą być stosowane do dezynfekcji saun suchych i mokrych, elementów wyposażenia basenów oraz obiektów w SPA; produkt może być stosowany w obszarze medycznym. Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni, które nie mogą być potraktowane roztworem wodnym. Stosować tylko na małych powierzchniach odpornych na działanie alkoholu.

Właściwości

Alco Cid Wipes wykazują działanie bakterio-, grzybo-, drożdżako- i wirusobójcze.

Skład: zgodnie z rozporządzeniem (WE) 528/2012: etanol - 80,0g/100g.

Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego i powszechnego.

Sposób użycia

Stosowanie: Przed dezynfekcją powierzchnie należy umyć i pozostawić do wyschnięcia. Aplikacja: przetrzeć chusteczką Alco Cid Wipes dezynfekowany obszar. Należy upewnić się, że powierzchnia pozostaje wilgotna przez wymagany czas kontaktu. 1 chusteczka nadaje się do dezynfekcji maksimum 1m<sup>2</sup>. Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 1 minuta (działanie na bakterie, drożdże i wirusy) oraz 2 minuty (działanie grzybobójcze).

Specyfikacja

Postać: wilgotne chusteczki

pH : ok. 6,5 (dotyczy płynu, którym nasączone są chusteczki)

Kolor chusteczki nasączone bezbarwnym płynem

Gęstość (20°C): ok. 0,85 kg/L (dotyczy płynu, którym nasączone są chusteczki)

Temperatura zapłonu 150C

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie powinno być zamknięte jeśli produkt nie jest w użyciu. Pierwsza pomoc: narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w wygodnej pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie; niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W przypadku kontakt ze skórą nie oczekuje się, że produkt stanowi zagrożenie podczas normalnego stosowania zgodnego z przeznaczeniem. Kontakt z oczami: spłukać niezwłocznie dużą ilością wody. W przypadku spożycia W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (pokazać opakowanie/etykiety lub kartę charakterystyki produktu). Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: inne niż wynikające z klasyfikacji nie są znane. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji/ Postępowanie z odpadami produktu: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia zbiorników wodnych i innych elementów środowiska. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia. Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przekazane do recyklingu. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Opakowanie:** 1 szt.